

Aplikacja mobilna i system
monitoringu dla osób z
zaburzeniem afektywnym
dwubiegunowym

Oferta

Cambria Systems sp. z o.o. Sp. k. oferuje możliwość korzystania z systemu monitoringu pacjentów z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i ze stowarzyszonej z nim aplikacji mobilnej CHADMON w celu wspierania terapii i wspomaganie diagnozy zmiany fazy



Aplikacja ChADMon umożliwia podniesienie jakości usług świadczonych przez ośrodek

Nasza usługa pozwala ośrodkom na podniesienie jakości usług świadczonych przez lekarzy psychiatrów oraz terapeutów poprzez monitoring pacjentów on-line, przyśpieszenie reakcji na zmiany w przebiegu choroby, ściślejszy kontakt z pacjentem oraz obiektywizację obserwacji.

System składa się z dwóch głównych elementów czyli Aplikacji CHADMon oraz systemu monitorującego

Aplikacja mobilna
CHADmon

Witaj!
Uczestniczysz w badaniu od:
12 dni

- Osoby kontaktowe 5
- Jak się czujesz? 1
- Jak sypiasz? 2
- Wykres samopoczucia 3
- Wykres snu 4

System dla lekarzy
eCRF

Wizyta kontrolna osobista 1

Data wizyty: 25/07/2018

Wizyta nie odbyła się

Zapisz Wyczyść

1. Ocena aktualnego stanu psychicznego Pacjenta

I. Skala Depresji Becka (BDI)

Liczba uzyskanych punktów: 10

Zapisz Wyczyść

II. Skala Oceny Depresji Hamiltona (HAMD17) Rozwiń

Suma Punkt 8: 0

Suma łącznie: 0

III. Skala Manii Younga (YMS) Rozwiń

Suma Punkt 6: 0

Suma łącznie: 0

IV. Wersja Skali CGI-BD do celów badania Zwin


Jak oceniasz w dniu dzisiejszym stan pacjenta?

- Depresja
- Nastój wyrównany (eutymia)
- Mania dystoryczna
- Mania euforyczna
- Stan zmienny (mieszany)

Aplikacja mobilna

Pozwala na monitoring choroby bez ingerencji **w prywatność pacjenta i nie wymaga wypełniania dzienniczka samopoczucia ani angażowania innych osób.** Jego największą zaletą jest obiektywizm, którego nie zapewniają tradycyjne metody obserwacji oparte na samoocenie pacjenta lub na ocenie otoczenia.

Aplikacja pozwala na wysłanie powiadomień do pacjenta oraz na informowanie jego bliskich o nadchodzącej zmianie fazy, **dzięki czemu można zareagować szybciej** i w odpowiednim momencie udać się do lekarza (o ile użytkownik tego sobie życzy i osoby te wyrażą zgodę).

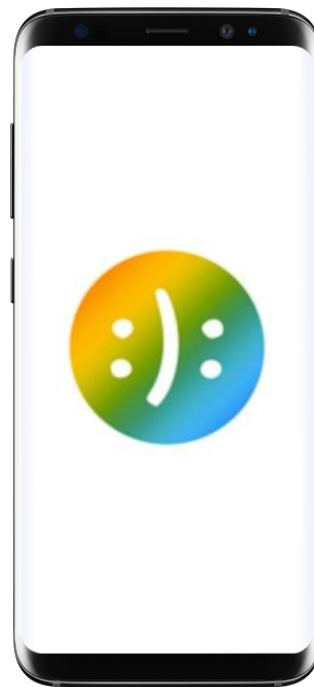


System monitorujący eCRF

To panel dla lekarza służący do obserwacji pacjentów z informacjami.

Wyświetla on komunikat w przypadku nadchodzącej zmiany fazy. Zawiera on listę pacjentów, ich wyniki oraz kluczowe parametry obserwacji.

Przeznaczeniem systemu jest także dostarczenie lekarzowi obiektywnych danych o aktywności pacjenta w długich okresach czasu a także o aktywności poprzedzającej zaplanowaną wizytę.

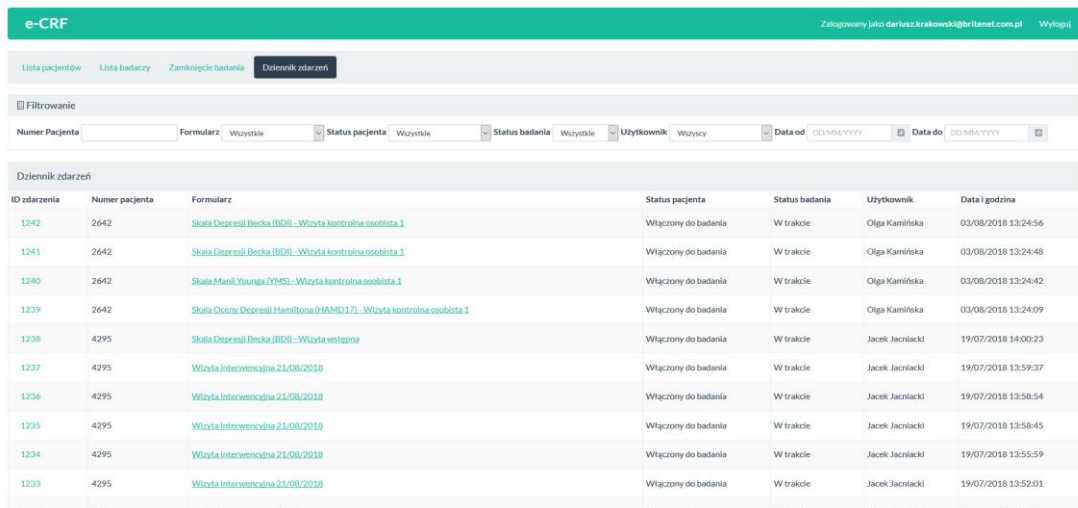

The screenshot displays the e-CRF system interface. At the top, there is a green header with the text "e-CRF" and a user login information "Zalogowany jako: darlusz.krakowski@brittenet.com.pl" and a "Wyloguj" button. Below the header, there are navigation tabs: "Lista pacjentów", "Lista badań", "Zamknięte badania", and "Dziennik zdarzeń" (which is currently selected). A "Filtrowanie" section contains several dropdown menus for "Numer Pacjenta", "Formularz", "Status pacjenta", "Status badania", "Użytkownik", and "Wizyty", along with date pickers for "Data od" and "Data do". The main content area is titled "Dziennik zdarzeń" and contains a table with the following columns: "ID zdarzenia", "Numer pacjenta", "Formularz", "Status pacjenta", "Status badania", "Użytkownik", and "Data i godzina". The table lists several events for patient 2642, including "Skala Depresji Becka (BDI) - Wizyta kontrolna osobista 1" and "Skala Manil Younga (YMS) - Wizyta kontrolna osobista 1".

ID zdarzenia	Numer pacjenta	Formularz	Status pacjenta	Status badania	Użytkownik	Data i godzina
1242	2642	Skala Depresji Becka (BDI) - Wizyta kontrolna osobista 1	Włączony do badania	W trakcie	Olga Kamińska	03/08/2018 13:24:56
1241	2642	Skala Depresji Becka (BDI) - Wizyta kontrolna osobista 1	Włączony do badania	W trakcie	Olga Kamińska	03/08/2018 13:24:48
1240	2642	Skala Manil Younga (YMS) - Wizyta kontrolna osobista 1	Włączony do badania	W trakcie	Olga Kamińska	03/08/2018 13:24:42
1239	2642	Skala Oceny Depresji Hamiltona (HAM-D17) - Wizyta kontrolna osobista 1	Włączony do badania	W trakcie	Olga Kamińska	03/08/2018 13:24:09
1238	4295	Skala Depresji Becka (BDI) - Wizyta telefoniczna	Włączony do badania	W trakcie	Jacek Jaciński	19/07/2018 14:00:23
1237	4295	Wizyta Interwencyjna 21/08/2018	Włączony do badania	W trakcie	Jacek Jaciński	19/07/2018 13:59:37
1236	4295	Wizyta Interwencyjna 21/08/2018	Włączony do badania	W trakcie	Jacek Jaciński	19/07/2018 13:58:54
1235	4295	Wizyta Interwencyjna 21/08/2018	Włączony do badania	W trakcie	Jacek Jaciński	19/07/2018 13:58:45
1234	4295	Wizyta Interwencyjna 21/08/2018	Włączony do badania	W trakcie	Jacek Jaciński	19/07/2018 13:55:59
1233	4295	Wizyta Interwencyjna 21/08/2018	Włączony do badania	W trakcie	Jacek Jaciński	19/07/2018 13:52:01

W ramach współpracy ośrodek otrzymuje od nas

- + Dostęp do aplikacji webowej spełniającej wymogi standardowej karty pacjenta, pozwalającej zarejestrować pacjenta w systemie monitoringu i umożliwiającej dostęp do danych zbieranych przez system monitoringu oraz konfigurację powiadomień.
- + Wsparcie techniczne zarówno dla aplikacji webowej użytkowanej przez lekarzy i terapeutów jak i dla aplikacji mobilnej użytkowanej przez pacjentów.
- + Szkolenie z użytkowania systemu dla lekarzy i terapeutów.

Koszty aplikacji

Pierwsze 6 miesięcy korzystania z aplikacji jest darmowe

Po tym okresie cena aplikacji dla ośrodka wynosi 30 PLN od prowadzonego pacjenta.

Dziękuję za uwagę



Karolkowa Business Park
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
